

KOLEJNOŚĆ POBIERANIA KRWI DO PRÓBÓWEK

Your Power for Health



greiner bio-one

Kolejność napełniania

próbówek VACUETTE® do pobierania krwi

- 1

Posiew krwi /
Probówka do odrzucenia


- 2

Koagulologia / CTAD *


- 3

Surowica z żelzem i bez żelzu


- 4

Heparyna z żelzem i bez żelzu


- 5

EDTA z żelzem i bez żelzu


- 6

Glukoza


- 7


Pozostałe



* Jeśli pobrana jako pierwsza, materiał jest odpowiedni do podstawowych badań (np. PT, APTT)

W przypadkach, kiedy posiew krwi nie jest zlecony,
GBO zaleca użycie jako pierwszej próbówki bez dodatków.

UWAGA: Zawsze postępuj według
procedury dotyczącej kolejności pobierania
krewi obowiązującej w twojej placówce.


 Greiner Bio-One GmbH
 Bad Hailer Str. 32
 4650 Weismünster
 Austria

www.gbo.com

CE